

トラウマメイキャップキット

取扱説明書



スミスメディカル・ジャパン株式会社

- 救急医療機器部 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-3 (KM弓町ビル2F) (03) 3816-3365
- 本 社 〒465-0093 名古屋市名東区一社1-87 (ユウトクビル4F) (052) 701-6128
- 札幌営業所 〒060-0062 札幌市中央区南2条西13-319 (南大通りビル二条館4F) (011) 221-8550
- 仙台営業所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-20 (セント北四6F) (022) 264-3371
- 東京営業所 〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-3 (KM弓町ビル2F) (03) 3816-3367
- 神奈川出張所 〒194-0004 東京都町田市鶴間19-1839 (クレインドビル205) (0427) 99-5490
- 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社1-79 (第6名昭ビル2F) (052) 703-7501**
- 金沢出張所 〒920-0022 金沢市北安江3-13-13 (NDビル) (076) 223-5801
- 大阪営業所 〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22 (大江ビル11F) (06) 6941-3813
- 神戸出張所 〒650-0022 神戸市中央区元町通6-1-8 (東栄ビル205) (078) 361-9180
- 岡山営業所 〒700-0951 岡山市田中537-1 (086) 241-5679
- 広島営業所 〒733-0834 広島市西区草津新町1-21-35 (広島ミクシスビル8F) (082) 277-6000
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-11 (山善ビル3F) (092) 473-7687

はじめに

災害救護訓練には、臨場感のある訓練が効果的であると言われております。このトラウマメイキャップキットは災害時に想定される各種外傷装着模型を選定、整備し、特殊なメイキャップを模擬患者に施すことにより、リアルな被災現場を再現致します。

主な構成品

- 創傷 - 四肢、顔面、頭部、胸部などの切創・挫創、眼球脱出、鼻部損傷、顔面裂傷、開放骨折、腸管脱出等
- ファンデーション - 四肢、顔面、頭部、胸部などの打撲・擦過傷等
- その他 - 熱傷用パック、模擬血液、人体用接着剤、両面テープ等
- メンテナンス - 人体用接着剤落し、化粧落としクリーム、洗浄用スポンジ等

商品説明

- 模擬血液 SB7 32OZ StageBlood (EME12 - 0001003) について



人体用。主成分はシロップで、ペパーミントの香りと甘い味を付けてあります。吐血想定時等に口に含んでも安全です。皮膚に付いた模擬血液は、水もしくはお湯でほとんど洗い流せます。

また、衣服に付着しても1,2日中であれば、洗剤等できれいに落とせます。

注意

模擬血液、接着剤等は、使用に際して皮膚が赤くなったり、かゆみが生じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。

メイキャップ方法

次頁以下に代表的な各種外傷装着例を示します。

● 打撲傷例



<使用キット>

ライニングカラー 深赤 4B (EME12 - 0003204)

赤 5A (EME12 - 0003203)

灰 3B (EME12 - 0003202)

黄 10 (EME12 - 0003206)

メイキャップスポンジ (EME12 - 0004001) 等



筋肉や関節等で盛り上がっている所や、出っ張っている所を探して位置を決めて下さい。



メイキャップスポンジにライニングカラー深赤、もしくは赤を少し付け軽く叩く様にして色付けして下さい。



メイキャップスポンジにライニングカラー灰を少し付け、軽く叩く様に赤色の上や周囲に色付けして、濃淡の影を作して下さい。



場合によっては、ライニングカラー黄を赤色、青色の周囲に軽く色付けして下さい。時間が経過した傷に見えます。



完成例。

● 擦過傷例



< 使用キット >

模擬血液SB7 32OZ StageBlood (EME12 - 0001003)

ペースト状血液TB2 6OZ ThickBlood (EME12 - 0001001)

汚し用ススCM1 4.5OZ CharcoalPowder (EME12 - 0001002)

ヘラ (EME12 - 0004003) 等。



傷の位置や方向を決定し、その部分の油分をスノーウェットクリーナーティッシュ (EMA02 - 0202) 等のエタノールを含んだもので清拭して下さい。



ヘラに多めにペースト状血液をとり、決定した位置に盛る様に付けて下さい。



盛ったペースト状血液をヘラ、もしくは指にて一方向に引き伸ばして下さい。



ヘラのギザギザしたほうに汚し用ススを少し付け、引き伸ばしたペースト状血液の上から引っかく様にして傷を付けて下さい。



場合によっては模擬血液を付けて、完成。

● 挫創例

< 使用キット >

スノーウェットクリーナーティッシュ (EMA02 - 0202)

両面テープシート (EME12 - 0004009)

傷セットASSORTER GLUE ON F219 (EME12 - 0002005)


模擬血液SB7 32OZ StageBlood (EME12 - 0001003)

ペースト状血液TB2 6OZ ThickBlood (EME12 - 0001001)

ヘラ (EME12 - 0004003) 等。



傷の位置や方向を決定し、その部分の油分をスノーウェットクリーナーティッシュ等のエタノールを含んだもので清拭して下さい。

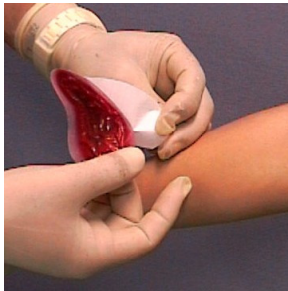

傷セットに両面テープを付け、決定した位置に貼り付けます。



この時、周囲が浮き上がらない様にしっかりと貼り付けて下さい。



ヘラにペースト状血液をとり、皮膚と貼り付けた傷モデルとの境界線を隠す様に塗って下さい。傷モデルの上にも少し塗って下さい。



模擬血液を傷に垂れ流して、完成。

● 開放骨折，切創，眼球脱出，顔面裂傷，鼻部損傷例等

< 使用キット >



開放骨折ME83(EME12 - 0001014)

切創ME8等(EME12 - 0001013等)

眼球脱出ME82(EME12 - 0001006)

顔面裂傷ME3(EME12 - 0001008)

鼻部損傷ME7(EME12 - 0001012)

接着剤SG2 1OZ SpiritGum(EME12 - 0001010)

スノーウェットクリーナーティッシュ

模擬血液，

ペースト状血液

ヘラ等。



傷の位置や方向を決定し、その部分の油分をスノーウェットクリーナーティッシュ等のエタノールを含んだもので清拭して下さい。



傷モデルの糊しろ部分に接着剤を隙間なく塗布し、ベタツキがほとんど無くなるまで、3～5分間乾燥させて下さい。

尚、糊しろ部分のわかりにくい傷モデル(切創，眼球脱出等)は、周囲の5mm幅に接着剤を隙間なく、塗布して下さい。

特に眼球脱出については目に接着剤が入らない様に注意して塗布して下さい。



傷モデルを決定した位置に貼り付けて下さい。乾燥が足りないと周囲が捲り上がりますが、しばらく指等で押さえ付けておけばしっかりと貼り付きます。

尚、眼球脱出については必ず目を閉じたまま貼り付け、目に接着剤が入らない様に注意して下さい。



傷モデルの赤色部分に、ヘラでペースト状血液を塗り込んで下さい。



また、皮膚と傷モデルの境界線を隠す様にヘラにペースト状血液をとり、皮膚と貼り付けた傷モデルとの境界線を隠す様に塗って下さい。傷モデルの上にも少し塗って下さい。



模擬血液を傷に垂れ流して、完成。

尚、切創等の傷モデルには瞬間接着剤等でアクリル板や金属片、木片、棒等を付けておくと、よりリアルな傷になります。

● 熱傷例



< 使用キット >

熱傷用パック (EME12 - 0004010)

スノーウェットクリーナーティッシュ (EMA02 - 0202)

模擬血液SB7 32OZ StageBlood (EME12 - 0001003)

汚し用ススCM1 4.5OZ CharcoalPowder (EME12 - 0001002)

ヘラ等。



傷の位置や方向を決定し、その部分の油分をスノーウェットクリーナーティッシュ等のエタノールを含んだもので清拭して下さい。



熱傷用パックを決定した位置に薄く塗り広げて下さい。



模擬血液を熱傷用パックの上から少量垂らし、パックに混ぜて下さい。



汚し用ススを少量付けて下さい。



熱傷用パックが完全に乾燥した後、部分的にパックを捲って、完成。

● 腸管脱出例

< 使用キット >

腸管脱出ABUDOMINAL WOUND 6808 (EME12 - 0002001)

模擬血液

ペースト状血液

汚し用スス

ヘラ等



腸管脱出を付属の赤いマジックテープで下腹部に取り付けて下さい。

模擬血液, ペースト状血液, 汚し用スス等を付けて、完成。

● 顔面蒼白例

< 使用キット >

グリースペイント肌色26P (EME12 - 0003101)

プラスカラーホワイト (EME12 - 0003205)

メイキャップスポンジ (EME12 - 0004001) 等。



肌色を唇に付け、プラスカラーホワイトを顔全面にパフで叩いて完成。

● 傷モデルの落とし方



< 使用キット >

人体用接着剤落としGR3 8OZ SpiritGumRemover (EME12 - 0001004)
スノーウェットクリーナーティッシュ (EMA02 - 0202) ,
化粧落としクリーム (EME12 - 0004007)
洗浄用角スポンジ (EME12 - 0004002) 等。




水もしくはお湯にて、ほとんど洗い流せます。

落ちにくい場合には、化粧落としクリーム及び洗浄用角スポンジ等をご使用下さい。



また、人体用接着剤には専用の接着剤落としをご使用下さい。

● 傷モデルのメンテナンス

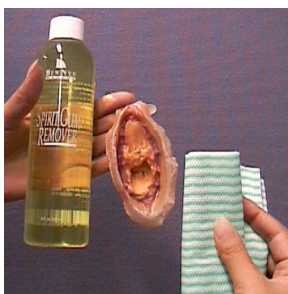

< 使用キット >

人体用接着剤落としGR3 8OZ SpiritGumRemover (EME12 - 0001004) 等

傷モデルに付着した模擬血液等をきれいに洗い流して、乾燥させて下さい。
また、接着剤は接着剤落とし等にてきれいに落として下さい。